

Famille : PROTECTION - SÉCURITÉ

Marque : **RUKO+**

DESRIPTIF

Descriptif :

Masque barrière 3 plis répondant aux exigences de la norme AFNOR SPEC S76-001 et utilisant des matières validées par la DGA avec des taux de filtration de projection de particules de 99.7%.

Précautions d'usage :

- Le temps de port du masque est limité à 4 heures
- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche
- Veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage et vérifier l'absence de jet d'air dans les airs lors d'une expiration forte Lors du port du masque éviter de le toucher ou de le déplacer.

Chaque fois que vous touchez un masque usagé, lavez-vous rigoureusement les mains et si vous avez besoin de boire ou de manger, changez de masque.

Lorsqu'il s'humidifie, remplacez le masque par un nouveau. Pour retirer le masque, l'enlever par l'arrière puis le jeter immédiatement dans une poubelle fermée (s'il n'est plus réutilisable).

Entretien du masque : Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac. Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Les plus :

- Barrette nasale pour un meilleur maintien
- Masque 4 couches polypropylène
- Facile à mettre et agréable à porter
- Lavable à 60°C

Argumentaire :

Moins onéreux que les masques chirurgicaux.

Famille : PROTECTION - SÉCURITÉ

Marque : **RUKO+**

| Réf. | Conditionnement | Lot de |
|----------|-----------------|--------|
| 65220.05 | sachet | x 5 |

INFOS :

Si le masque n'est pas assez serré, ne pas hésiter à faire un noeud avec l'élastique derrière les oreilles.

